

## CONDOR GOLD LINE Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik

Präzise, technisch auf dem neuesten Stand, einfach und schnell einsetzbar und absolut exakt – diese Anforderungen haben Chirurgen an ihre OP-Instrumente. Genau das bietet das **CONDOR GOLD LINE Wund-Spreizer-System für die Endoprothetik**. Denn hier kombinieren wir innovative Technik mit Anforderungen aus der Praxis und unserem langjährigen Praxis-Know-how. Und nicht nur das: Unsere Wund-Spreizer-Systeme sind Qualitätsarbeit »Made in Germany«.


Diese Wertarbeit findet weltweit Anklang. Die effizienten OP-Helfer sind unverzichtbares Equipment für jeden Operateur. Die Zahl der Kliniken und Anwender steigt stetig.

### Modulares Prinzip

Unsere Wund-Spreizer-Systeme schaffen Freiräume für leichtes, bequemes und Kosten effizientes Arbeiten im Operationssaal. Die Basis dafür bildet ein intelligentes und modulares System, das in Kombination mit Wundhakenmodellen für spezielle chirurgische Eingriffe exakt auf den jeweiligen chirurgischen OP-Eingriff abgestimmt werden kann. Nach dem Baukastenprinzip sind unsere Wund-Spreizer-Systeme individuell einsetzbar und voll kompatibel: Bestimmen Sie, welche Wundhaken Sie für Ihre persönliche OP-Technik einsetzen möchten.

Das Endoprothetik-Set ist sowohl auf Hüft- als auch auf Knie-Endoprothetik ausgerichtet. Beide Operationen lassen sich problemlos mit dem CONDOR Wund-Spreizer-System durchführen:

### Endoprothetik Hüfte    Endoprothetik Knie

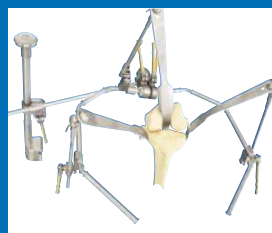

Lernen Sie die Kernelemente und Vorteile des Sets kennen, die weltweit überzeugen: Denn mit seinen einzigartigen Kugелеlementen ermöglicht das CONDOR Wund-Spreizer-System exzellente Einstellungen bei allen Eingriffen. Spezielle Kugelaufnahmen für Hohmann-Knochenhebel gewährleisten ein hohes Maß an Flexibilität. So gelangen Operateure zu einer bisher nicht gekannten Bewegungsfreiheit, von der alle OP-Beteiligten profitieren. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und können mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht werden. Die integrierte elektrische Trennung zwischen Patient und OP-Tisch schließt eine Patientengefährdung durch hochfrequenten Leckstrom aus – ein weiterer überzeugender Vorteil des CONDOR Wund-Spreizer-Systems.

**Interesse? Sie möchten das CONDOR Wund-Spreizer-System Endoprothetik unverbindlich kennen lernen? Gern unterstützt Sie unser Außendienst beim Ersteinsatz.**

# Flexibler, effizienter und präziser arbeiten mit CONDOR Präzision



Knie- und Hüft-Endoprothetik sind Klinikalltag. Immer häufiger werden dabei die Endoprothetik-Wund-Spreizer-Systeme von CONDOR eingesetzt. Aus gutem Grund: Denn mit diesem OP-Werkzeug schaffen sich Operateure die Flexibilität und Beweglichkeit, die besonders bei diesen Operationen dringend benötigt werden. Bequemes Arbeiten ist somit garantiert. In der Regel kann eine Assistenzkraft sogar eingespart und für effizientere Aufgaben eingesetzt werden, da der Situs für den Operateur durch das Wund-Spreizer-System dargestellt wird.



Weitere Vorteile des Endoprothetik-Sets, die für Hüft- und Knie-Operationen gleichermaßen gelten: Dank der Kugeladapter von CONDOR können Sie Ihre vorhandenen Hohmann-Knochenhebel weiterhin nutzen. Diese flexible Einstellung an jeder Situsposition ist in dieser Form nur mit den CONDOR Kugeladaptern realisierbar.

Ein weiterer Vorteil: Die Kugeladapter verfügen über einen Schnellverschluss, der bewusst über eine Hebel-Funktion geöffnet werden kann – das spart Zeit, erleichtert das Handling und ist ein weiterer Garant für die bestmögliche, flexible Einstellung. Gleichzeitig wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kugeladapter verhindert. Selbst bei Einsatz eines Navigationssystems beeinträchtigt das CONDOR Wund-Spreizer-System nicht.

## Die allgemeinen Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Systems für Endoprothetik im Überblick:

- Flexible Einstellung durch Kugelgelenke
- Nutzung vorhandener Hohmann-Knochenhebel
- Einfaches Fixieren und Lösen der Hohmann-Knochenhebel durch Schnappverschluss
- Bequemes und Kräfte sparendes Arbeiten
- Effizienter Personaleinsatz

## Endoprothetik für Knie-Operationen

Neben den allgemeinen Vorteilen des CONDOR Wund-Spreizer-Systems, die sowohl für Hüft- als auch Knie-Operationen gelten, zeichnet sich das OP-Equipment besonders durch folgende Vorteile für die **Knie-Operationen** aus:


Während der OP steht das Knie aufrecht im rechten Winkel auf dem OP-Tisch. Das ermöglicht ein bequemes und übersichtliches Arbeiten und Operieren. Der Operationsaufbau ist nach unten offen. Auch dies bringt eine wesentliche Arbeiterleichterung für die an der Operation beteiligten Fachkräfte mit sich.

Die schnelle und flexible Adaption der Knochenhebel garantiert ein barrierefreies Arbeiten. Intra-operativ muss stets überprüft werden, ob das Implantat korrekt platziert wurde: Schnell und mit wenigen Handgriffen lassen sich hierzu die Hohmann-Knochenhebel lösen.



## Die Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Systems Endoprothetik für Knie-Operationen im Überblick:

- Flexibler, offener Aufbau
- Ergonomische Arbeiterleichterung
- Flexibler Einsatz der Hohmann-Knochenhebel
- Möglichkeit der Durchbewegung der Beine

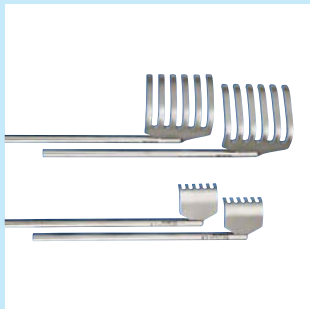

### Hüft-Operationen

Die Komponenten des CONDOR Wund-Spreizer-Systems Endoprothetik, die speziell für die Endoprothetik konzipiert wurden, zeichnen sich durch überzeugende Leistungs- und Funktionsmerkmale aus.

Hüft-Endoprothetik erfordert ein hohes Maß an OP-Vorbereitung. Hier ist die effiziente Unterstützung durch die Komponenten des Wund-Spreizer-Systems besonders gefragt. Das einfache und flexible Handling schafft Einstellmöglichkeiten in jeder Position, die einen barrierefreien Zugang auf jeden Fall gewährleisten. Zudem können scharfe Wundhaken sowohl bei der Inzision wie auch beim Wundverschluss eingesetzt werden.

### Die Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Systems Endoprothetik für Hüft-Operationen im Überblick:

- Flexibilität
- Bewegungsfreiheit
- Effizienter Personaleinsatz
- Einsatz von scharfen Wundhaken möglich
- Bedienerfreundlichkeit des Systems
- Kombination mit Beinhalterung

### Beinhalterung

Die ideale Ergänzung zum Wund-Spreizer-System Endoprothetik ist die Beinhalterung. Sie kann in Kombination mit dem Endoprothetik-Set eingesetzt werden und wird mit einer zweiten Klammer angebracht. Während der Operation liegt das Bein somit auf der Beinhalterung und muss nicht festgehalten werden. Für das ergonomisch anstrengende Halten des Beines ist daher kein zusätzliches Personal nötig. Besonders für Wochenend- und Bereitschaftsdienste ist diese Beinhalterung eine absolut notwendige Variante, da gerade zu diesen Zeiten weniger OP-Personal zur Verfügung steht.

Die Beinhalterung gibt es exklusiv nur von CONDOR. Kein anderer Anbieter hat diese praktische, ergonomisch sinnvolle und personaleffektive Halterung im Angebot. Das einfache Montieren der Beinhalterung funktioniert in Sekundenschnelle. Der Effekt und die Vorteile, die für alle an der Operation Beteiligten daraus resultieren, sind enorm. Von ihnen profitiert das OP-Team während der ganzen OP-Dauer. Mit der Beinhalterung und den Kugelgelenken ist zudem ein exakteres Ausrichten des Beines möglich.



### Die Vorteile der CONDOR Beinhalterung im Überblick:

- Effektiver Personaleinsatz
- Sekundenschnelle Montage
- Exaktes Ausrichten des Beines
- Kein ergonomisch anstrengendes Halten des Beines

Lernen Sie das CONDOR Wund-Spreizer-System für Endoprothetik kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer kostenlosen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!



## International anerkannt und weltweit eingesetzt: CONDOR GOLD LINE



### Die Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Systems im Überblick:

- Modular austauschbar
- Kompatibilität der Wundhaken
- Multifunktionalität
- 3D-Einstellung
- Einfache Bedienbarkeit
- Elektrische Sicherheit
- Anwenderschulung durch OP-Begleitung
- Leichte Reinigung des Geräts
- OP-Kosten-Optimierung
- Zertifiziert gem. EN ISO 13485:2003 CE 0044
- Entlastung von qualifiziertem Fachpersonal
- Made in Germany

Neben den Zusatzsets für Endoprothetik zählen auch Zusatzsysteme für Gynäkologie, Chirurgie und Urologie zu unserem Portfolio.

**CONDOR<sup>®</sup>**  
GmbH  
**MEDICALTECHNIK**

CONDOR GmbH MEDICALTECHNIK | Franz-Kleine-Str. 13 | 33154 Salzkotten | Germany

Telefon: +49 (0) 52 58 - 99 16-0 | Telefax: +49 (0) 52 58 - 99 16-16 | E-Mail: [info@condor-med.de](mailto:info@condor-med.de) | [www.condor-med.de](http://www.condor-med.de)

CONDOR ist ein eingetragenes Warenzeichen der CONDOR GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Stand September 2007.